

- Bajo contenido en alcohol y libre de aldehídos
- Detergente desinfectante para pequeñas superficies y productos sanitarios
- Tiempo recomendado de exposición: al menos **1 minuto**
- Excelente compatibilidad con todo tipo de materiales
- **Amplio espectro** : eficacia frente a bacterias, hongos y virus
- Sin aerosol
- No perfumado

Instrucciones de uso

Listo para su uso (no diluir). Limpiar la superficie a desinfectar con un paño de un solo uso impregnado con Meliseptol® Foam pure y dejar secar completamente. Esperar que el tiempo de contacto haya transcurrido. No aclarar.

En caso de superficies con contaminación visible, realizar la desinfección en dos pasos:

- 1) Eliminar la suciedad con un paño impregnado con Meliseptol® Foam pure.
- 2) Desinfectar con un segundo paño de un solo uso impregnado con Meliseptol® Foam pure.



ACTÚA EN 1 MINUTO



Composición (por 100 g)

17 g 1-propanol, 0,23 g cloruro de didecildimetilamonio, excipientes: <5% surfactantes no iónicos, agua purificada

Eficacia y protocolo de uso de Meliseptol® Foam pure

Microorganismo	Tiempo de exposición
Virus de la gripe A	15 segundos
Bacterias (incl. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>), hongos y levaduras (<i>C. albicans</i>), virus encapsulados (incl. VHB, VHC, VIH), virus no encapsulados (<i>Rotavirus</i>)	1 minuto
Norovirus, Polyomavirus	5 minutos